

# EQUIPO DE DIAGNOSTICO PORTÁTIL DE 3,5 VOLTIOS CON BOMBILLOS L.E.D. CON BATERÍA RECARGABLE Y ARO CONVERTIDOR



**Modelo: 97200-CL**



## EL SET INCLUYE:

- 1 MANGO RECARGABLE CON BATERÍA DE 3,5 VOLTIOS CON ARO CONVERTIDOR PARA PILAS ALCALINAS TIPO "C"
- 1 OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO CON ILUMINADOR DE GARGANTA INTEGRADO MODELO: 20000L
- 1 OFTALMOSCOPIO COAXIAL DE 18 APERTURAS MODELO: 11720L
- 1 JUEGO DE 4 ESPECULAS PARA OIDO REUSABLES CON DIFERENTES TAMAÑOS
- 1 ESTUCHE RÍGIDO PREFORMADO CON CREMALLERA
- Bombillos tecnología L.E.D. de alta duración (20.000 horas de trabajo).



**Welch Allyn**

# OFTALMOSCOPIO COAXIAL DE 3,5 VOLTIOS BOMBILLO L.E.D.

## **3,5 V oftalmoscopio coaxial 11720 L**

Oftalmoscopio sistema coaxial de visión que facilita la oftalmoscopia al permitir la entrada en el ojo, un mayor campo de visión, y la reducción de los reflejos en comparación con el estándar de oftalmoscopios.

**Bombillo de luz L.E.D.** que proporciona el color verdadero del tejido y garantizando rendimiento y duración.

La Óptica coaxial produce luz sin sombras o manchas. Facilita la entrada a los alumnos, y un mayor campo de visión frente a oftalmoscopios estándar.

5 aperturas (micro punto, pupila pequeña, mediana, franja, de fijación)

2 Filtros: Detecte abrasiones corneales con filtro azul cobalto; y filtro polarizador que elimina prácticamente la reflexión corneal.

La óptica es sellada para mantener fuera del equipo es polvo y la suciedad.

28 dioptrías o lentes con un rango de -25 a +40.  
Descanso para ceja de goma (comodidad para el examinador).



**WelchAllyn®**

# OTOSCOPIO CON ILUMINADOR DE GARGANTA DE 3,5 VOLTIOS CON BOMBILLO L.E.D.

## 3,5 V Otoscopio con iluminador 20000L

Otoscopio de Diagnóstico ofrece una iluminación 30% más blanca e intensa permitiéndole obtener una visualización superior y rápida.

- Fibra óptica que produce una iluminación fría sin reflejos ni obstrucciones
- Gran ángulo de visualización que permite la instrumentación óptima.
- Sistema sellado para otoscopía neumática.
- Incluye iluminador de garganta en la parte baja del otoscopio.
- Puerto de insuflación para otoscopía neumática.
- Ventana de visualización con aumento de 3X. Deslizante para facilitar la instrumentación.

**Bombillo de luz L.E.D.** que proporciona el color verdadero del tejido y garantizando rendimiento y duración.

## Especulas

Especulas de polipropileno inocuas, que facilitan la entrada al canal auditivo.

Construcción con bordes que no lastiman.


Sistema de anclaje interno y externo para equipos compatibles.



**Welch Allyn**

## ¿Dónde se utiliza mayormente el mango convertible?

El mango convertible es un salvavidas si está de servicio, o durante un examen y se olvidó recargar su batería. También el mango convertible es muy útil en caso de trabajar en el campo o en áreas donde la electricidad es escasa.

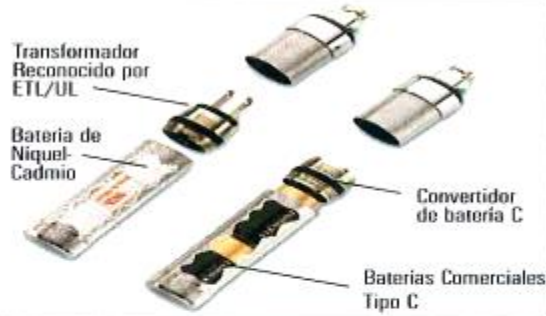

## ¿Cómo trabaja este mango con pilas recargables o baterías tipo C?

Simplemente remueva la batería recargable y el transformador, y rémplazelas por dos baterías tipo C y el convertidor



## ¿Cómo se recargan las baterías de níquel-cadmio?

Nuestro cargador integrado permite conectar a cualquier tomacorriente para recargarse durante la noche.

Dondequiera que este,

# Puede Recargar su Mango Convertible de 3.5v Welch Allyn

Utilice baterías recargables o baterías comerciales tipo C con su mango convertible de 3.5v. Aun si se le olvidase recargar su batería, o esté trabajando donde no haya electricidad, puede remover el modulo del transformador, insertar dos baterías tipo C, colocar el anillo convertidor (incluido), y continúe con sus exámenes.

